# UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO





#### SETS DE AGUJA Y ESTABILIZADOR EZ-10®

CADA SET INCLUYE UNA AGUJA EZ-10° ESTÉRIL DE CALIBRE 15G, UN APÓSITO EZ-STABILIZER°, UN EQUIPO DE EXTENSIÓN° EZ-CONNECT°, PULSERA PARA EL PACIENTE Y COPA NEEDLEVISE° PARA OBJETOS PUNZANTES

Aguja de 45 mm	Sets de 5 agujas	9079P-VC-005
Aguja de 25 mm	Sets de 5 agujas	9001P-VC-005
Aguja de 15 mm	Sets de 5 agujas	9018P-VC-005

#### SETS DE AGUJAS EZ-10®

CADA SET INCLUYE UNA AGUJA EZ-IO® ESTÉRIL DE CALIBRE
15, UN EQUIPO DE EXTENSIÓN EZ-CONNECT®,
PULSERA PARA EL PACIENTE Y COPA NEEDLEVISE®
DADA OBJETOS PILINZANTES

PARA UBJETUS PUNZANTES			
Aguja de 45 mm	Sets de 5 agujas	9079-VC-005	
	Set de 1 aguja	9079-VC-001	
	Set de 1 aguja	9078	
	para capacitación		
Aguja de 25 mm	Sets de 5 agujas	9001-VC-005	
	Set de 1 aguja	9001-VC-001	
	Set de 1 aguja	9017	
	para capacitación		
Aguja de 15 mm	Sets de 5 agujas	9018-VC-005	
	Set de 1 aguja	9018-VC-001	
	Set de 1 aguja	9021	
	para capacitación		

#### **ACCESORIOS**

Maletin blando para acceso vascular (amarillo) EZ-IO®



9065

9074



Apósito EZ-Stabilizer® (caja de 5)

9066-VC-005


# ARROW EZ-10°

ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO

# SOLO 3 SEGUNDOS PARA QUE MEDICAMENTOS O FLUIDOS LLEGUEN AL CORAZON<sup>2</sup>





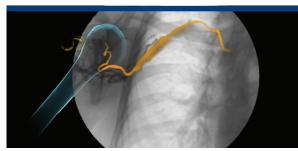

En estas imagenes, el video de una fluoroscopia de una infusion en el humero proximal muestra claramente la efectiva administracion de farmacos a traves de un cateter EZ-IO hasta llegar al corazon en 3 segundos\*.

Visite Teleflex.com/EZIO o Youtube para ver el video real.



\*Imágenes visualmente mejoradas

# ARROW EZ-IO

ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO

#### **CITAS**

- 1 Neumar RW, Otto CW, Link MS, et al. Adult advanced cardiovascular life support. 2010 American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation 2010;122(suppl 3):S729-67. doi:10.1161/ CIRCULATIONAHA.110.970988
- 2 Datos en archivo. Estudios internos de Vidacare del año 2013.
- 3 Hoskins SL, Nascimento P Jr., Lima RM, Espana-Tenorio, JM, Kramer GC. Pharmacokinetics of intraosseous and central venous drug delivery during cardiopulmonary resuscitation. *Resuscitation* 2011;doi:10.1016/j. resuscitation.2011.07.041
- 4 Paxton JH, Knuth TE, Klausner HA. Proximal humerus intraosseous infusion: a preferred emergency venous access. *J Trauma*. 2009;67(3):1-7.
- 5 Cooper BR, Mahoney PF, Hodgetts TJ, Mellor A. Intra-osseous access (EZ-I0®) for resuscitation: UK military combat experience. J R Army Med Corps. 2007;153(4):314-316.
- 6 Dolister M, Miller S, Borron S, et al. Intraosseous vascular access is safe, effective and costs less than central venous catheters for patients in the hospital setting [publicado en línea antes de su impresión el 3 de enero de 2013]. J Vasc Access. doi:10.5301/jva.5000130.
- 7 Voigt J, Waltzman M, Lottenberg L. Intraosseous vascular access for in-hospital emergency use: A systematic clinical review of the literature and analysis *Pediatr Emerg Care* 2012;28(2):185-998.
- 8 Von Hoff DD, Kuhn JG, Burris HA, Miller LJ. Does intraosseous equal intravenous? A phamacokinetic study. Am J Emerg Med 2008; 26: 31-8.
- 9 MIller LJ, Philbeck TE, Montez DF, Spadaccini CJ. A new study of intraosseous blood for laboratory analysis. Arch Pathol Lab Med 2009;133:1628. Investigación patrocinada por Teleflex Incorporated (Vidacare LLC.)

#### 10 Instrucciones de uso de EZ-IO

11 En base a pruebas preclínicas y clínicas, al comparar fuentes arteriales o venosas e IO, numerosos valores comunes de laboratorio tuvieron una fuerte correlación; otros valores mostraron similitud clínica sin correlación significativa a nivel estadístico. Por consiguiente, hay que actuar con precaución en cuanto a su interpretación. Se han estudiado ciertos análisis con resultados aceptables. Consulte con su laboratorio sobre las capacidades de procesamiento de muestras IO. Para obtener más información referida a análisis de laboratorio IO, consulte la publicación de Vidacare Science and Fundamentals of Intraosseous Vascular Access (Ciencia y fundamentos del acceso vascular intraóseo), disponible en: www.teleflex.com/ezioeducation.

NeedleVISE es una marca comercial registrada de Atrion Medical Products, Inc.

Teleflex, Arrow, EZ-IO, EZ-Stabilizer y EZ-Connect son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliados.

© 2015 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. LA MC-001299 ES

Solo con receta. Consulte las Instrucciones de uso para obtener información detallada sobre indicaciones de uso, contraindicaciones, posibles eventos adversos, advertencias y precauciones.

# Acceso que permite salvar vidas

ARROW EZ-10

ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO

# Cuando los segundos cuentan



ACCESO VASCULAR INTRAÓSEO




Complicaciones tales como la deshidratación y el riesgo de infección pueden contribuir a la situación.

El sistema Arrow® EZ-IO® permite al personal medico obtener un acceso vascular rápido y efectivo a través del espacio intraóseo sin varias de las complicaciones graves asociadas a otras formas de acceso vascular.

El espacio intraóseo (10) del húmero, la tibia y el fémur distal (pediatría) actúa como una larga vena no colapsable¹.

Los fluidos o medicamentos infundidos en el espacio intraóseo acceden a la circulación central en pocos segundos<sup>2,3</sup>.

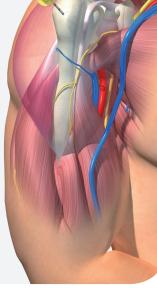

Para obtener más información, llame al:

+1.919.433.4999 o visite ARROWEZIO.com



### CONFÍE EN EL SISTEMA ARROW® EZ-IO® PARA UN ACCESO VASCULAR INMEDIATO





#### **SEGURO**

Sets de agujas EZ-IO®

<1 % de complicaciones graves<sup>2</sup>

Apósito EZ Stabilizer®

#### RÁPIDO

Acceso vascular con anestesia y obtención de buen flujo en 90 segundos<sup>4</sup>

#### FFICIENTE

97 % de acceso exitoso en el primer intento<sup>5</sup>


#### VERSÁTIL

Puede ser colocado por un proveedor de atención de la salud calificado

#### CONVENIENTE

No requiere equipos ni recursos complementarios<sup>6</sup>



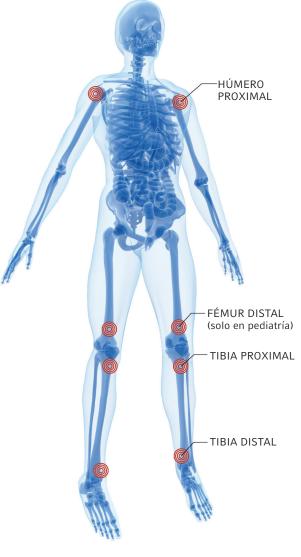

¡NO utilice el sistema motorizado ARROW® EZ-IO® en el esternón!



#### IDEAL PARA TODOS LOS CASOS MÉDICAMENTE NECESARIOS





#### Cardíaco

- » Arritmia cardíaca



#### Respiratorio

- » Edema pulmonar/Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF, por sus
- » Status Asthmaticus/EPOC



#### Neurológico





- Prácticamente cualquier medicamento que pueda administrarse por via IV periférica puede administrarse a través de la vía IO en la misma dosis, velocidad y concentración<sup>7,8</sup>.
- Permite realizar analisis de laboratorio rapidamente a los pacientes: la mayoría de los análisis de rutina se comparan con muestras de sangre IV9,11.



• Indicado para pacientes adultos y pediátricos siempre que el acceso vascular sea difícil de obtener en situaciones de emergencia, urgencia o cualquier situación medicamente necesaria, por un periodo de 24 horas<sup>10</sup>.

#### **CONTRAINDICACIONES:**

- Fractura del hueso donde se hace la insercion
- Infección en el área de inserción
- Incapacidad de identificar los puntos de referencia
- Acceso IO o intento de acceso IO en el mismo hueso dentro de las 48 horas anteriores
- Prótesis o procedimiento ortopédico cerca del sitio de inserción

Las complicaciones potenciales significativas pueden incluir infección local o sistémica, hematoma, extravasaciones/infiltración u otras complicaciones asociadas a la inserción percutánea de dispositivos estériles.



por personal hospitalario y prehospitalario, incluidos enfermeros y médicos:

- Áreas médicas/quirúrgicas
- Servicios de emergencia
- · Servicios médicos aéreos
- Servicios de traumatología
- Respuesta rápida/Equipos de reanimación
- Cuidados intensivos
- Equipos de infusión/Equipos de IV
- Cirugía v anestesia
- Trabajo de labor y parto

Varias organizaciones de sociedades médicas mundiales recomiendan o respaldan el uso del acceso vascular intraóseo como una vía de acceso vascular importante,<sup>6</sup> incluidas las siguientes:

- Colegio Americano de Cirujanos
- Colegio Americano de Médicos de Urgencias
- Asociación Nacional de Médicos de Urgencias
- Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados Intensivos
- Asociación de Personal de Enfermería de Urgencias
- Sociedad de Personal de Enfermería Pediátrica
- Sociedad de Personal de Enfermería de Infusión
- Asociación Americana del Corazón

DESCARGUE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ARROW® EZ-IO® PARA OPTIMIZAR SU CAPACITACIÓN DE IO





Para obtener más información, llame al:

+1.919.433.4999 o visite ARROWEZIO.com